



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	

1. Conceito:

Óculos de proteção facial: Dispositivo facial transparente, que ao ser acoplado ao rosto promove a proteção de olhos contra respingos de partículas de produtos químicos ou materiais infectantes.

Protetor facial (*faceshield*): Equipamento feito de material transparente que visa proteger o rosto inteiro do usuário contra riscos de respingos, detritos de produtos químicos ou materiais potencialmente infectantes.

2. Objetivo:

Orientar quanto à utilização correta dos óculos de proteção e/ou protetor facial (*faceshield*).

3. Aplicação:

Os óculos de proteção e os protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados nas seguintes situações:

- quando houver risco de exposição do usuário a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc. Podem ser utilizados em conjunto para garantir maior proteção do usuário, caso haja disponibilidade destes dois insumos;
- durante a coleta e manuseio de amostras laboratoriais de casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19;
- atendimentos relacionados à Perícia Oficial em Saúde, psicossocial e pedagógico, desde que haja riscos de exposição do usuário a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc.;
- atendimento ao público, quando não houver barreira física (placas de acrílico, barreiras de vidro, divisórias, etc).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	

4. Registro: Não se aplica
5. Documentos complementares: <ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento Operacional Padrão de Higienização das Mãos;▪ Cartilha UFOB - Coronavírus: medidas de precaução e utilização de EPI durante a pandemia de Sars-Cov-2 (Covid-19).
6. Materiais: <ul style="list-style-type: none">● Óculos de proteção facial;● Protetor facial;● Pia com água, sabão e papel toalha;● Solução de álcool 70% e/ou desinfetante de ação comprovada contra o novo coronavírus e compatível com o EPI a ser higienizado, disponível na instituição;● Gaze ou pano limpo de material macio;● Lixeira com tampa e acionamento por pedal.
7. Procedimentos: PARA COLOCAR OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL: Realize a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	



1. Coloque os óculos e/ou protetor facial ajustando-os apropriadamente à face, segurando-os pelas hastes e os acoplando em cima das orelhas. Os óculos devem estar confortáveis à face, cobrindo os olhos totalmente, nem grandes nem pequenos. Caso vá utilizar estes dois equipamentos, coloque primeiro os óculos e proceda à colocação do protetor facial.

2. Realize a higienização das mãos após colocação dos óculos/protetor.

PARA RETIRAR OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL:

1. Realize a higienização das mãos imediatamente antes da remoção dos óculos e/ou protetor



2. Remova os óculos/protetor facial segurando-os pelas hastes laterais, visto que a frente destes equipamentos poderá estar contaminada após o uso.



Em caso de uso dos dois equipamentos, retire primeiro o protetor facial e em seguida, retire os óculos de proteção.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	

3. Após retirada destes equipamentos, higienize novamente as mãos e faça a higienização dos equipamentos.

HIGIENIZAÇÃO DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL APÓS USO:

1. Realize a limpeza e desinfecção **imediatamente** após o uso. O usuário deve usar luvas para realizar estes procedimentos;
2. Caso haja sujidade visível nestes equipamentos, lave-os com água e sabão/detergente antes de realizar a desinfecção com solução alcóolica 70%, quaternário de amônio ou outro desinfetante disponível para este fim;
3. Para desinfetar, aplique o produto desinfetante em toda a área destes equipamentos e utilize uma gaze ou pano limpo adequado para espalhar o produto;
 - a) **Caso o desinfetante utilizado seja a solução alcóolica a 70%**, recomenda-se realizar o processo de aplicação + fricção por 30 segundos com pano/gaze. Realizar este procedimento 3 vezes no mesmo equipamento para garantir total desinfecção;
 - b) **Caso o desinfetante disponível seja o quaternário de amônio**, aplique o produto em todo o equipamento a ser desinfetado, passe gaze ou pano limpo adequado para espalhar o produto (da parte interna para a externa, sem nunca trazer o pano da parte externa para a interna). Espere o equipamento secar naturalmente;
4. Realize a higiene das mãos após a higienização dos equipamentos.
5. Descarte a luva e gaze/panos em lixeira para resíduos infectantes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	

8. Orientações:

- **Óculos de proteção/protetor facial devem ser de uso exclusivo do usuário, não sendo recomendado compartilhamento;**
- Os óculos de proteção/protetor facial devem ser guardados no serviço, em local adequado, ventilado e com identificação do profissional que a utiliza.
- Caso o pessoa utilize óculos para correção visual, dar preferência ao uso de protetor facial (*faceshield*);
- Antes da paramentação, verifique cuidadosamente a integridade e funcionalidade dos EPI a serem utilizados. Caso apresente qualquer defeito/perda de integridade, o mesmo deve ser trocado imediatamente.

9. Histórico de modificações:

Descrição de alterações realizadas durante a revisão do Procedimento Operacional Padrão.

Data	Item modificado	Descrição da modificação	Revisão
30/11/2021	Aplicação	Uso em Perícia Oficial em Saúde, psicossocial e pedagógico, desde que haja riscos de exposição do usuário a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc..	01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Procedimento: USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU PROTETOR FACIAL (<i>FACESHIELD</i>)	Número/ano: 03/2020.
	Data de elaboração: 09/09/2020.
	Data de revisão: 30/11/2021.
Executante: Comunidade acadêmica da UFOB (discentes, docentes, técnicos administrativos em educação e trabalhadores terceirizados/prestadores de serviços)	Data de atualização:
	Data de aprovação: 17/09/2020.
Responsável pela elaboração: Grupo de Trabalho para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB	

10. Referências:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 – **Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-cov-2)**. Versão atualizada em 08/05/20. Acesso em 10/09/2020.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPI)**. 2020. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf>. Acesso em 10/09/2020.

11. Anexos:

Não se aplica.